



3ml (мл) пробірка циліндрична для RIA, з ПС, градуювання 2ml (мл), діаметр 11 x 70 mm (мм)

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки лабораторні призначені для проведення пробпідготовки: розведення проб, титрування тощо. Можуть використовуватися як вторинна пробірка при роботі з автоматичними аналізаторами і в ручних методах досліджень. Пробірки полімерні, одноразового застосування.

Опис виробу:

Циліндрична пробірка виготовлена з полістиролу. Пробірки представляють собою вироби циліндричної форми, у яких діаметр набагато менше висоти. Круглodonні циліндричні пробірки є аналітичними. Пробірки можуть мати градуювальні кільця або градуювання (графічну або рельєфну).

№ п/п	Найменування виробу	Об'єм, мл
1	3ml (мл) пробірка циліндрична для RIA, з ПС, градуювання 2ml (мл), діаметр 11x70 mm (мм)	3

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням

Використання:

1. Вибрати пробірку, відповідно необхідного типу дослідження.
2. Помістити досліджуваній матеріал всередину пробірки, далі використовувати пробірку відповідно до поставлених завдань.
3. При використанні як ємність для зберігання або транспортування зразка. Слід закрити пробірку пробкою або кришкою для запобігання втрати зразка.
На аналітичному етапі дослідження пробірку використовують для проведення пробопідготовки, постановки реакції або безпосереднього вимірювання в аналізаторі як ємність зручної форми для візуалізації протікання реакцій і процесів.
4. Після закінчення роботи пробірку необхідно утилізувати.



Пакування: 1000 шт в поліетиленовому пакеті.

Термін придатності: 5 років

Партія, дата виробництва та кінцевий термін придатності вказані на упаковці.

Дата останнього перегляду: 10.05.2021



Виробник:

Aptaca S.p.A.

Regione Monforte, 30 – 14053 Canelli (Asti), Italy

Аптака С.п.А.

Реджіоне Монфорте, 30 – 14053 Канеллі (Асті), Італія

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка», код ЄДРПОУ: 38670845,
місцезнаходження юридичної особи: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21,
Україна

Офіційний дистриб'ютор виробника в Україні:

ТОВ «ІА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.