

Стомічний калоприймач «CASEX» однокомпонентний, відкритий




Інструкція по застосуванню

Стомічний калоприймач «CASEX» **однокомпонентний** (далі – калоприймач) призначений для догляду за стомами.




1. **Підготовка калоприймача до застосування.** Перед використанням очистіть шкіру навколо стоми теплою водою та витріть рушником. Шкіра має бути вільна від будь-яких субстанцій (кремів, розчинів, рідин).

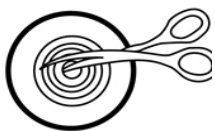

2. **Визначення отвору пластини калоприймача для стоми.** Визначте діаметр стоми за допомогою шаблону, що додається. Запам'ятайте діаметр та виріжте ножицями отвір відповідного розміру та по формі стоми або трохи більший. **Не вирізайте діаметр, більший за максимальний розмір пластини.**



3. **Одягання мішка.** Перед зняттям захисної плівки із адгезивної поверхні пластини на мішку, зігрійте її долонями, потім легко надуйте мішок. Далі починаючи з нижнього краю, поступово знімайте захисну плівку і приклеюйте мішок до шкіри під стомою, отвір повинен точно прилягати до стоми. Пальцями рухайте верхній край адгезивної поверхні пластини над стомою, поступово приклеюйте її. Для кращої адгезії обережно притисніть поверхню мішка до шкіри.

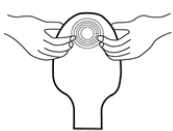

4. **Закривання-відкривання мішка.** Для закривання мішка прямокутну частину з випускним отвором (запуск) загорніть у напрямку до шкіри та зафіксуйте універсальним затискачем. Для відкривання необхідно розімкнути універсальний затискач та відгорнути прямокутну частину мішка.



5. **Випорожнення мішка.** Розімкніть універсальний затискач, розгорніть запуск випускного отвору мішка і випорожніть його. **Випорожнення мішка слід проводити в туалеті.** Залишок вмісту мішка та на випускному отворі можна видалити туалетним папером, чи промити водою і просушити серветкою. Якщо пластина міцно тримається на шкірі, закрити мішок (див. п.4).

6. Під час прийняття душу, купання чи плавання мішок може залишатись на місці, після чого його необхідно просушити.

7. Для зняття калоприймача відклейте пластину, починаючи з верхнього краю. Використаний калоприймач слід утилізувати.

Калоприймач може залишатися на шкірі протягом кількох днів. Якщо пластина щільно прилягає до шкіри, немає прошарків між пластиною та шкірою, то міняти калоприймач після випорожнення мішка не обов'язково.

УВАГА! Якщо на шкірі з'явилися подразнення, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

УВАГА! Не можна використовувати пластину двічі, якщо вона відклеїлась від шкіри.

УТИЛІЗАЦІЯ

Перед утилізацією калоприймача, необхідно випорожнити мішок.

Ніколи не викидайте мішок в туалет, це може стати причиною забиття каналізації.

Використаний калоприймач слід викидати у ємкості для сміття.

Технічні характеристики

Розміри вирізу: 13-64 мм, 13-80 мм, 13-90 мм

Пластина – гідроклоїдна з Алое Вера

Додатковий пластр для надійної фіксації - так

Направляючі кільця для вирізання отвору – так

Мікро перфорований м'який шар, що прилягає до тіла - так

Колір мішка: прозорий / непрозорий (тілесного кольору)

Умовні позначення

	Знак відповідності технічному регламенту
	Ідентифікаційний номер
	Серія партії
	Дата виробництва
	Термін придатності
	Одноразового використання
	Дивись інструкцію з використання
	Температурний діапазон

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ



Температура зберігання



Зберігати в сухому місці




Термін зберігання – 3 роки з дати виробництва (вказано на упаковці).



Виробник

Маркування на товарі:

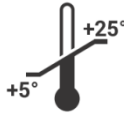

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Дата останнього перегляду - 08 лютого 2021 року



Виробник:

Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médico-Hospitalares Ltda, Avenida Fredolin Wolf, 4474 - Santa Felicidade 82410-330 – Curitiba – Parana – Brazil / касекс індустрія де пластикос і продуктос медіко-госпіталес лтда, Авеніда Фредолін Волф, 4474 – Санта Фелісідаде 82410-330 – Курітіба – Парана - Бразилія

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор

Шульга О.Л.

