

**3M** Наука.  
Втілена в життя.™

## Окклюдери для очей 3M™ Opticlude™

Спеціальні очні пластирі для використання  
при косоокості та амбліопії у дітей.



## Окклюдери для очей 3М™ Opticlude™ — це спеціальні очні пластри, які використовуються при косоокості та амбліопії у дітей і чудово підходять для застосування на їх ніжній та чутливій шкірі.

- Виготовлені із м'якого дихаючого нетканого матеріалу
- Гіпоалергенний акрилатний адгезив
- Не містять латексу
- Наявність поглинаючої подушечки, що не прилипає, дозволяє безболісно видаляти пов'язку та захистити очі і вії від клейкого шару
- Три варіанти розміру: Mini, Midi та Maxi дозволяють підібрати відповідний варіант для кожного пацієнта
- Яскравий дизайн пластрів, а також наявність додаткових картинок у деяких моделях перетворюють лікування на ігровий процес



### Поради щодо застосування

#### Накладання:

- Очистити і висушити шкіру навколо очей
- Закрити очі та розслабити м'язи обличчя
- Накладати пов'язку, не розтягуючи її, вузькою частиною зі сторони носа
- Обережно притиснути пов'язку рукою для покращення адгезії

#### Зняття:

- Обережно відділити зовнішній клейкий край пов'язки
- Притримувати шкіру обличчя однією рукою, поступово знімаючи пов'язку
- У разі прилипання поглинаючої подушечки, змочити пов'язку для делікатнішого зняття

Номер за каталогом	Колір	Розмір	шт./кор.
1537/20	Бежеві	Mini: 5.0 см × 6.2 см	20
1537/50			50
1539/20		Maxi: 5.7 см × 8.0 см	20
1539/50			50
2537PE	Кольорові (з принтом)	Mini: 5.0 см × 6.0 см	30
2538PE		Midi: 5.3 см × 7.0 см	30
2539PE		Maxi: 5.7 см × 8.0 см	30

Для додаткового захисту чутливої шкіри рекомендується застосовувати:

## Захисна плівка 3M™ Cavilon™

Оригінальний безспиртовий засіб на основі терполімерів, який допоможе запобігти пошкодженням шкіри і захистить вже травмовану шкіру від подальших ускладнень. Дуже тонка повністю прозора плівка створює захисний бар'єр і водночас дозволяє шкірі дихати.

- Не містить спирту, не пече, не викликає подразнень, алергії, дискомфорту
- Швидко висихає, довго діє, водонепроникна і не змивається водою та мильними розчинами
- Повторює форму шкіри та не обмежує рухи
- Стерильний



## Поради щодо застосування

### Накладання:

- При нанесенні на складки шкіри вирівняти ділянку
- Нанести засіб на всю площу ділянки, яка буде контактувати із адгезивною частиною пов'язки
- При потраплянні в очі негайно промити великою кількістю води
- Зачекати поки висохне 30–60 секунд
- Уникати використання мазей та кремів

### Зняття:

- Плівка буде видалятися щоразу зі зміною пов'язки
- При необхідності, для зняття плівки можна застосувати засоби для видалення медичних адгезивів або спиртовмісні розчини

Номер за каталогом	Форма	Об'єм	шт./кор.
3343E	Аплікатор	1 мл	25
3344E	Серветка	1 мл	30

## **Офіційний дистриб'ютор в Україні:**

ТОВ «ЛА МЕД»

04210 м.Київ,

пр-т Героїв Сталіграда, 2-Г, корп.1

(044) 3000-504

[sale@lamed.com.ua](mailto:sale@lamed.com.ua)



**ТОВ «3М Україна»**

**м. Київ, вул. М. Амосова 12**

**БЦ «Горизонт Парк»**

**Тел.: (044) 490 57 77**

**[3m.com.ua](http://3m.com.ua)**