



UA.TR.039

Аплікатор "ВОЛЕС" в пробірці із захисним ковпачком та середовищем

Інструкція по використанню

Призначення:

Аплікатор призначений для взяття, зберігання і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін.

Опис виробу:

Аплікатор складається з трьох основних елементів:

- вісь аплікатора, при виготовленні якої використовується дерево, алюмінієвий дріт або пластик;
- тампон, який виготовляють з віскози або бавовни;
- пробірка з середовищем, виготовлена з пластику.

Середовище призначене для підтримки життєздатності мікроорганізмів при транспортуванні в лабораторію. Види транспортного середовища: Amies (Еймса); Amies (Еймса) з вугіллям; Stuart (Стюарта); Cary-Blair (Кері Блейра) та ін.

Кожне середовище володіє своїми характерними особливостями, виходячи з яких і проводиться вибір того чи іншого аплікатора при проведенні дослідження.

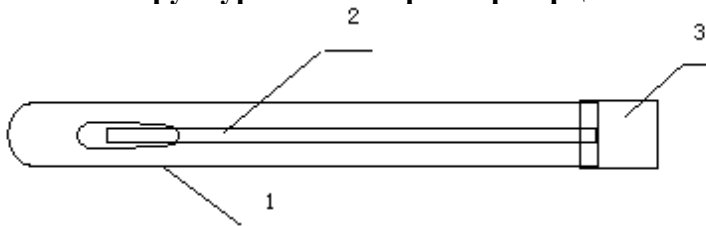
Аплікатор "Волес" з пластиковою паличкою в пробірці з середовищем Cary Blair, призначений для взяття біологічного матеріалу для лабораторного вивчення, а також для інших маніпуляцій. Аплікатор знаходиться в спеціальній пробірці зі спеціально середовищем Cary Blair і використовується не тільки для взяття зразків, а й подальшого їх транспортування в лабораторію для аналізів. Це середовище призначена для збереження і підтримання життєздатності мікроорганізмів під час транспортування в лабораторію. Пробірка гарантує повну безпеку зразка і персоналу. Аплікатор стерильний, індивідуально упакований. Упаковка: інд. уп., в ящику 100 шт.

Середовище Кері Блейр є ще одною модифікацією середовища Стюарт, оригінально розробленою для фекальних зразків. Гліцерофосфат замінений на неорганічний фосфат, тому що гліцерофосфат є метаболітом деяких бактерій, з ним вони можуть розвиватись, відповідно кількість патогенів може збільшуватись. Метиленовий синій був також видалений, а рН збільшено до 8.4.

Середовище Кері Блейр придатне до консервування більшості патогенів, включаючи нестабільні, такі як *Neisseria gonorrhoeae*, *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*, *Bordetella pertusis*

Streptococcus pneumoniae, *Shigella flexneri*, *Pasteurella pestis*, *Campylobacter* Spp. Це типове середовище для транспортування анаеробних бактерій. Зберігання протягом 48-72 годин.

Структура аплікатора в пробірці із захисним ковпачком

**1-Пробірка****2-Аплікатор****3-Кришечка**

Основні параметри транспортної пробірки (одиниці виміру в мм)

Характеристика		Вимірювання ($\pm 10\%$)		
		Пробірка		Ватний тампон
		Довжина	Діаметр	Довжина
Вид пробірки	чоловічі	75	12	60
		100	12	85
	жіночі	120	12	105
		160	12	150

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Виберіть аплікатор в залежності від завдань дослідження.
2. Розкрийте стерильну упаковку, витягніть аплікатор і відберіть на нього необхідну кількість біоматеріалу.
3. Дістаньте пробірку з транспортним середовищем і помістіть аплікатор в пробірку, не торкаючись її стінок.
4. Взятую пробу зберігати при кімнатній температурі до 72 годин.
5. Проведіть необхідні маніпуляції.
6. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China

Джянгсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД

Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джянгсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»»



Дата останнього перегляду
02.12.2020

Шульга О. Л.