



Пробірка для забору капілярної крові

з К3/К2 ЕДТА

Інструкція по використанню

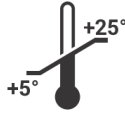
Призначення

Пробірки з ЕДТА-К2 та ЕДТА-К3 використовуються для дослідження цільної крові у гематології. Пробірки з ЕДТА можуть використовуватися для рутинних імуногематологічних досліджень (тобто групування еритроцитів), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Внутрішня сторона стінки пробірки вкрита ЕДТА-К2 або ЕДТА-К3. ЕДТА зв'язує іони кальцію, тим самим блокуючи систему згортання крові. Клінічний аналіз крові слід проводити упродовж 3 годин після забору крові.

Найменування	Наповнювач	Об'єм	Капіляр	Колір кришки	Пакування
Пробірка для забору капілярної крові з К2 ЕДТА	К2 ЕДТА	0,2 мл 0,25 мл 0,5 мл	без капіляру	фіолетовий	Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.; транспортна коробка – 2000 шт.
Пробірка для забору капілярної крові з К3 ЕДТА	К3 ЕДТА	0,2 мл 0,25 мл 0,5 мл	без капіляру	фіолетовий	Індивідуальна упаковка; упаковка 100 шт.; транспортна коробка – 2000 шт.

Спосіб використання:

1. Виберіть необхідний об'єм пробірки в залежності від завдань дослідження.
2. Підготуйте допоміжні засоби для взяття крові (одноразовий стерильний ланцет, систему взяття капілярної крові, дезінфікуючий засіб, ватний тампон).
3. Обробіть місце уколу, дайте висохнути (залишки дезінфікуючого засобу можуть викликати гемоліз).
4. Проведіть пункцію за допомогою стерильного ланцета.
5. Першу краплю крові витріть.
6. Обережно масажуючи долоню, палець, або п'яту, зберіть краплі крові в пробірку.
7. Коли пробірка буде заповнена, поверніть її вертикально, щоб кров стекла на дно.
8. Закрийте контейнер.
9. Обережно переверніть пробірку 8-10 разів, негайно, після забору крові, щоб отримати вірну суміш добавки та крові. Переверніть наповнену пробірку, а потім верніть її у вертикальне положення.
10. Не струшуйте!
11. На заповнений контейнер нанесіть маркування.
12. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

**Маркування на товарі:**

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China Jiangsu

Адреса: Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China /

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД,

адреса: Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.