



Джгут для венозних маніпуляцій "ВОЛЕС" для дорослих

Інструкція по використанню

призначений для стиснення венозних судин при венопункції

- виготовлений з м'якої, пружної прогумованої стрічки;
- довжина стрічки - 450 мм;
- ширина стрічки - 25 мм;
- застібка на кінцях стрічки виготовлена з пластмаси;
- багаторазового застосування;
- термін придатності 5 років.


Інструкція по застосуванню:

- Одягніть петлю джгута на руку пацієнта приблизно на ширину долоні (7,5 см) вище передбачуваного місця венепункції.
- Вставте засувку в корпус застібки.
- Потягніть із зусиллям за вільний кінець джгута для обмеження циркуляції крові.
- Для ослаблення петлі натисніть на край застібки.
- Після закінчення процедури – зніміть джгут.

Увага!

Тривалість накладення джгута не повинна перевищувати 1 хвилину.

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

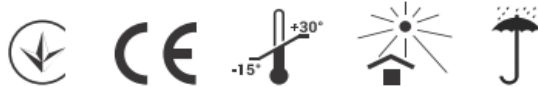

Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.,

Адреса: Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China /

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД,

адреса: Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду
02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.