



UA.TR.039

## Катетер для годування «ВОЛЕС»

### Інструкція по використанню

#### Призначення

Катетери для годування призначені для ентерального живлення та введення лікарських засобів в порожнину шлунку. Можуть використовуватися в неонатології, педіатрії і у дорослих пацієнтів.

#### Опис виробу:

Виготовлені з полівінілхлориду. Складається з прозорої трубки з м'яким, закритим дистальним кінцем і відкритим проксимальним у вигляді воронкоподібного конектора з кришечкою. Наявність 2-х бокових отворів на дистальному кінці. Кольорово закодований конектор, забезпечений герметичним корком, перешкоджає витіканню рідини та інфікуванню вмісту зонду. Має з'єднання «Луер». Рентгено-контрастна смужка по всій довжині, полегшує визначення положення катетера в шлунково-кишковому тракті.

#### Кольорове кодування

| Розмір, СН | Внут. d, мм | Зовн. d, мм | Довжина, мм | Розмірний ряд по кольору конектора |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 6          | 1,1         | 2,0         | 400         | зелений                            |
| 8          | 1,7         | 2,7         | 400         | синій                              |
| 10         | 2,3         | 3,3         | 400         | чорний                             |

Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Кожен катетер упакований індивідуально.

#### Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

#### Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

#### Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

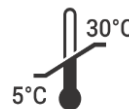
Не використовувати не за призначенням.

Тільки для одноразового використання.

Повторна стерилізація – недопустима.

**Спосіб використання:**

1. Перевірити цілісність індивідуальної упаковки;
2. Одягніть рукавички;
3. Обережно введіть зонд через носовий прохід в шлунок;
4. Закріпіть вільний кінець зонда на щоці пацієнта за допомогою лейкопластиру або спеціального набору;
5. Під'єднайте шприц або систему ентерального харчування з поживною сумішшю до зонда;
6. Після проведення ентерального годування або введення лікарських препаратів закрити зонд герметичною кришкою.
7. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

**Маркування на товарі:**

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корп. 1

**Виробник:** Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd

ADD: No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City, Zhejiang Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Дата останнього перегляду

02.11.2020

Директор  
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.