



Сечоприймач «ВОЛЕС» 100 мл дитячий стерильний (для хлопчиків/ для дівчат/ універсальний)



UA.TR.099

Інструкція для застосування

Призначення

Сечоприймач призначений для збору сечі у дітей раннього віку.

Опис виробу:

Сечоприймач складається з декількох елементів:

1. Поліетиленовий мішечок. Містить градування від 10мл до 100мл.
2. Сечоприймальний отвір. Існує три види отвору:
 - Овальний – є універсальним і підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток. Однак більш зручно користуватися спеціалізованими сечоприймачами.
 - Для хлопчиків – отвір має яйцеподібну форму, загострену донизу.
 - Для дівчаток – має форму, з невеликими відгалуженнями знизу з боків.
3. Липучка для кріплення. Спеціальний клей не містить шкідливих речовин.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Для одноразового використання, не підлягає дезінфекції і стерилізації.

Не залишати сечоприймач прикріпленим більше години. Якщо протягом години не вдалося зібрати сечу - необхідно зняти сечоприймач і прикріпити новий.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

Особливих відмінностей в користуванні сечоприймачів для хлопчиків, дівчаток та універсального немає.

1. Перевірити цілісність упаковки і термін придатності виробу.
2. Підготуйте дитину (не обробляйте шкіру маслом, тальком, кремом).
3. Вкладіть дитину на спину на безпечну, рівну поверхню.
4. Обробіть руки антисептичним розчином.
5. Для забезпечення стерильності рекомендується надіти на руки медичні рукавички.
6. Обережно розкрийте упаковку, витягніть сечоприймач, не порушуючи його стерильність.
7. Зніміть захисну паперову стрічку з фіксуючого липкого шару.
8. На чисту шкіру малюка закріпіть сечоприймач. Він повинен розташовуватися таким чином, щоб сечовипускальний отвір дитини було направлено всередину мішечка. Дівчаткам його кріплять до статевих губ, а у хлопчиків просовують усередину пеніс і закріплюють липучку на лобку і яєчках.
9. Для запобігання відклеювання, сечоприймач, можна закрити памперсом або за допомогою пелюшки. Робити це потрібно обережно, щоб не допустити зміщення.



10. Після збору сечі, обережно відклейте сечоприймач.
11. Відріжте куточок пакета і злийте його вміст в ємність для аналізу.
12. Після використання, обробіть і утилізуйте згідно встановлених вимог.

	Серія
	Дата виробництва
	Використати до
	Для одноразового застосування
	Стерилізовано оксидом етилену

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Зберігайте у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів місці.



Виробник:

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

ДЖІАНГСУ КАНГДЖІН МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ ЛО., ЛТД.

№56 Чангженг Род, Донгшу віллаге, Женглу Тоун, Вуджін Дістрікт, Чангжоу Сіті, Джіангсу Провінсе, 213111, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 300 05 04.

Дата останнього перегляду

01.04.2021 року

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О.Л.