

Інструкція із застосування Стрічки для безшовного закриття ран Steri-Strip™

Опис:

Стрічки для безшовного закриття ран Steri-Strip™ виготовлені з пористого, нетканого матеріалу, посилені для міцності волокнами та вкриті шаром гіпоалергенного адгезиву.

Стрічки для безшовного закриття ран Steri-Strip™ змішаних кольорових тонів виготовлені з пористого, нетканого матеріалу, посилені для міцності волокнами та вкриті шаром гіпоалергенного адгезиву.

Еластичні стрічки для безшовного закриття ран Steri-Strip™ виготовлені з пористого, нетканого, еластичного матеріалу, що дозволяє живим тканинам розтягуватися та рухатись. Вони вкриті шаром гіпоалергенного адгезиву.

Призначення:

Стрічки для безшовного закриття ран Steri-Strip™ призначені для закриття розривів шкіри або хірургічних розрізів. Вони можуть використовуватись в поєднанні зі швами або скріпками або після їх зняття.

Протипоказання:

1. не можна застосовувати у разі неможливості їхнього приклеювання. Потенційними факторами погіршення адгезії є присутність на шкірі ексудату, жиру, вологості або надмірного волоссяного покриву.
2. не можна накладати на інфіковані рани.
3. не можна застосовувати тоді, коли рани дуже розтягнені, і їхні краї неможливо зблизити пальцями або пінцетом.

Попередження:

1. Післяопераційна едема може спричинити появу у місцях прикладання стрічки розтріскування шкіри або пухирів, або втрату стрічкою адгезійних властивостей.
2. Після зняття будь-якої хірургічної плівки або адгезійної стрічки для закриття рани може спостерігатися відшарування шкіри.
3. У незначній кількості пацієнтів після зняття стрічки може спостерігатися гіпо- або гіперпигментація шкіри, що є характерним наслідком прикладання адгезійних матеріалів.
4. Під час клінічних випробувань стрічок подекуди спостерігалася поява вугрів та фолікуліту.

Застереження:

1. Для забезпечення потрібної адгезії шкіра повинна бути чистою, сухою та знежиреною.
2. Стрічка для закриття рани повинна прикладатися без натягу. Надмірний натяг може викликати розтріскування шкіри або появу пухирів.

Інструкція із експлуатації

1. Вимийте та висушіть шкіру. Якщо бажаєте, змастіть шкіру бензойною тинктурою для поліпшення адгезії.
2. Відкрийте упаковку. Вийміть картку зі стрічками та відірвіть її фрагмент по лінії перфорації.
3. Візьміть стрічку за кінець, підніміть його вгору та відокремте стрічку від картки.
4. Якщо стрічкою потрібно закрити рану без накладання швів або скріпок, зведіть краї рани пальцями або пінцетом. Не натягуючи, накладіть стрічку поперек рани.

5. Якщо рана велика, розділіть її на секції для розподілу натягу. Накладіть кілька стрічок на відстані приблизно 3 мм одна від одної.
6. На ті стрічки, які закривають рану, на відстані 12 мм від їх країв можна накласти додаткові стрічки, розташувавши їх паралельно краям рани. Цим можна зменшити натяг шкіри під кінцями основних стрічок.

Пакування, зберігання та стерильність:

Вироби постачаються стерильними, наклеєними на картки, в окремих конвертах.

Зберігати вироби потрібно при кімнатній температурі, уникаючи зайвого нагрівання та підвищення вологості.

Стерильність зберігається до пошкодження або відкриття конверту.

Символи:



Не використовуйте, якщо упаковку пошкоджено або відкрито



Засторога! Ознайомитися із супровідними документами
Використати до



Не містить латексу



Код партії



Повторно використовувати заборонено

Виробник:



3M Health Care, 2510 Conway Ave. Bldg. 275-5W-06 Saint Paul, MN 55144 USA



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ЗМ Україна"

Вул. Амосова, 12, 7-й поверх

м. Київ, 03680, Україна

Тел. +38(044)4905777

Електронна адреса Support.ua@mmm.com



Затверджено