

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не проводьте дефібриляцію крізь полімерні плівки, бо вони можуть вигинатися, через що втрачається ефективність дефібриляції.
- Плівка не підлягає повторній стерилізації.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Хірургічна антимікробна плівка Ioban™ 2 не застосовується, коли відомо, що пацієнт має чутливість до йоду.

ПОКАЗАННЯ:

Антимікробна хірургічна плівка Ioban™ 2 призначена виключно для зовнішнього застосування як хірургічна плівка, що забезпечує довготривалу бактерицидну дію.

Вказівки щодо застосування:

1. Продезинфікуйте операційне поле згідно з відповідними правилами асептики.
2. Впевніться у тому, що шкіра суха: висушіть її повітряним струменем або протріть стерильною серветкою.
3. Накладайте хірургічну бактерицидну плівку Ioban™ 2 лише на ретельно висушену, неушкоджену шкіру. Тримайте плівку над шкірою на відстані кількох сантиметрів. Візьміться за краї плівки, не вкриті адгезивом. Розгортайте плівку, відокремлюючи її від лайнеру.
4. При появі символу напис "Stop", припиніть розгортання плівки.
5. Користуючись стерильною серветкою, притисніть плівку до шкіри вздовж лінії майбутнього розрізу для забезпечення надійного контакту зі шкірою. Розгладьте плівку БЕЗ НАТЯГУ таким чином, щоб вона правильно розмістилася на операційному полі. Розгладжуйте плівку у напрямку від лінії майбутнього розрізу для того, щоб уникнути зморщок під час приклеювання.
6. Для видалення плівки обережно знімайте її під кутом 180°. Згортайте плівку, дотримуючись цього кута нахилу. Під час видалення плівки тримайте її якнайближче до місця контакту адгезійного покриття зі шкірою. Це дозволить уникнути різкого відриву. Як правило, шкіра літніх пацієнтів вразлива. Тому у цьому випадку треба бути особливо обережними під час накладання або знімання матеріалів, які мають адгезійні властивості.

Плівки стерильні за умови, що упаковку не пошкоджено або не відкрито.

Умови зберігання: При кімнатній температурі. Не рекомендується зберігання при підвищеній температурі та надмірній вологості.

Зберігати при температурі не вище за вказану.

Символи:



Не використовуйте, якщо упаковку пошкоджено або відкрито



Не містить латексу

Виробник:



3M Health Care, 2510 Conway Ave. Bldg. 275-
5W-06 Saint Paul, MN 55144 USA



UA.TR.116

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ЗМ Україна"

Вул. Амосова, 12, 7-й поверх

м. Київ, 03680, Україна

Тел. +38(044)4905777

Електронна адреса Support.ua@mmm.com

