



## Інструкція з використання

### *Haemolance Plus*

#### *Ланцети безпечні стерильні одноразового використання*

**Призначення:** використовуються для проколу шкіри (найчастіше пальця) при заборі капілярної крові на аналіз.

**Характеристики:** Ланцет безпечний – це одноразовий стерильний автоматичний скарифікатор, конструкція якого виключає ймовірність випадкового контакту пацієнта або медпрацівника з голкою/лезом як до, так і після його використання. Голка/лезо закрита захисним ковпачком, а після використання голка/лезо повертається в корпус ланцета.

#### **Інструкція із застосування:**

1. Дотримуючись правил асептики, скручуючим рухом за годинниковою стрілкою виверніть кольоровий захисний ковпачок з корпусу ланцета. **УВАГА!** Не використовуйте ланцет, якщо на корпусі відсутній, не закріплений або пошкоджений захисний ковпачок.
2. Виберіть місце на кінчику пальцю (п'ятки) пацієнта для забору капілярної крові (для отримання максимального обсягу крові і зменшення больових відчуттів необхідно здійснювати прокол трохи змістившись від центру подушечки пальця (рекомендується бокова поверхня подушечки безіменного пальця)).
3. Притиснувши ланцет до поверхні шкіри і міцно утримуючи його строго перпендикулярно передбачуваного місця проколу, натисніть на кнопку спуска ланцета безпечного.
4. Утилізуйте використаний одноразовий безпечний ланцет в призначений для цього контейнер для утилізації відповідно до вимог чинного законодавства.
5. М'якими масажними рухами вздовж пальця в напрямку місця проколу заберіть необхідний обсяг крові.

#### **Застереження:**

1. Уникати намокання, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
  2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
  3. Не використовувати, якщо пошкоджений захисний ковпачок ланцета безпечного.
  4. Лише для одноразового використання!
- Виріб був стерилізований радіаційним методом (R).  
Апірогенний та нетоксичний.  
Термін придатності - 5 років від дати виробництва.  
Норма фасування - 200 шт. в упаковці.  
Дата останнього перегляду: 23 червня 2021 року.



#### **Виробник:**

HTL-STREFA S.A. (Ейч Ті Ел – СТРЕФА С.А.)  
ul. Adamowek 7 (вулиця Адамовек, 7)  
95-035 Ozorkow, Poland (95-035 місто Озоркув, Польща)

#### **Уповноважений представник виробника в Україні:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка», код ЄДРПОУ: 38670845, місцезнаходження юридичної особи: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна

#### **Офіційний дистриб'ютор виробника в Україні:**

ТОВ «ЛА МЕД»,  
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда 2-Г, корпус 1.  
Директор  
Шульга О.Л.

